

INSTRUKCIJA

Siekalu "pūlinga" testa veikšana
izglītības iestadēs



KOMPLEKTA SATURS

spirta salvetes
vai dezinfekcijas
līdzeklis



skolēnu saraksts

stobriņš



transportēšanas
maiss

parauga nēmšanas
kociņu tamponi



BIO HAZARD BAG
Vernichtungsbeutel
for autoclaving and disposal of hazardous
contaminated materials
zum Autoklavieren und Vernichten von
gefährlichen infektiösen Materialien

cimdi




Kas ir PŪLINGS

metode, kurā paraugi no visiem klasē esošajiem tiek apvienoti vienā
paraugā, kas pēc tam tiek testēts laboratorijā.



Centrālā
Laboratorija

Testa nēmēja satiksmes plūsma

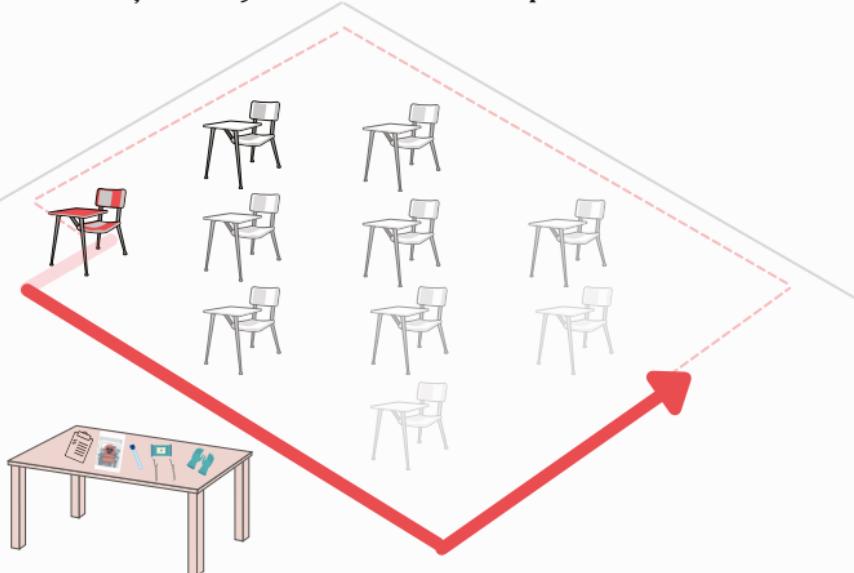

Testēšanas soļi

1.



SKOLOTĀJS UZVELK GUMIJAS CIMDUS.

2.



SKOLOTĀJS KATRAM IZDOT SPIRTA
SALVETI UN VATES TAMPONU.

3.



SKOLĒNU ROKU DEZINFEKCJJA.



Nomazgājiet rokas vai nodezinfecejiet, izmantojot spirta
salveti.



Centrālā
Laboratorija

4. SKOLNIEKS ATVER TAMPONU.

Atveriet tampona iepakojumu, izņemiet
ņemšanas kociņu aiz roktura.
Uzmanīgi! neaiztikt tampona daļu.

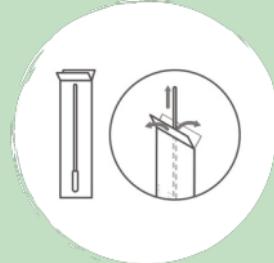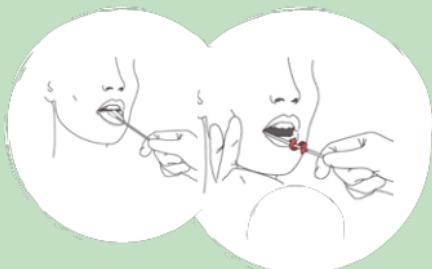

5. MATERIĀLA PAŅEMŠANA.

Ievadiet ņemšanas kociņa tamponu
mutes dobumā un paturiet aiz vaigiem 20 sekundes.


Tad vairākas reizes ar rotējošam kustībām virpiniet
kociņu gar mutes dobuma gļotādu, pleskaroties mēlei,
zobiem vai smaganām.

6.

SKOLOTĀJS SAVĀC VISUS TAMPONUS, IEVIETOJOT MATERIĀLU STOBRĪNĀ.

Ievietojet kociņu ar vates tamponu uz leju transportēšanas
stobriņā, nolauziet ņemšanas kociņa nevajadzīgo daļu tam
paredzētajā vietā, lai var uzskrūvēt stobriņa korķīti.

Kociņiem laušanas vieta var atšķirties.

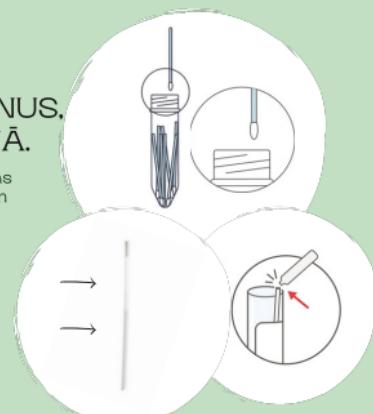

7. AIZSKRŪVĒ STOBRĪNU.

Kad visi tamponi ir savākti un ielikti stobriņā, to
aizsrūvē un ievieto atpakaļ biodrošības maisā.

8. SARAKSTA NOFORMĒJUMS


Skolotājs pārbauda skolēnu sarakstu un skaidri marķē
(IZSVĪTRŌ) tos skolēnus, kas testēšanas rezultātā nepiedalās.

Ja, skolnieks ir skolā, bet nav sarakstā, skaitī paraugu kā aizpildīt sarakstu ar
papildus skolēniem.



Centrālā
Laboratorija

Izglītības iestāde

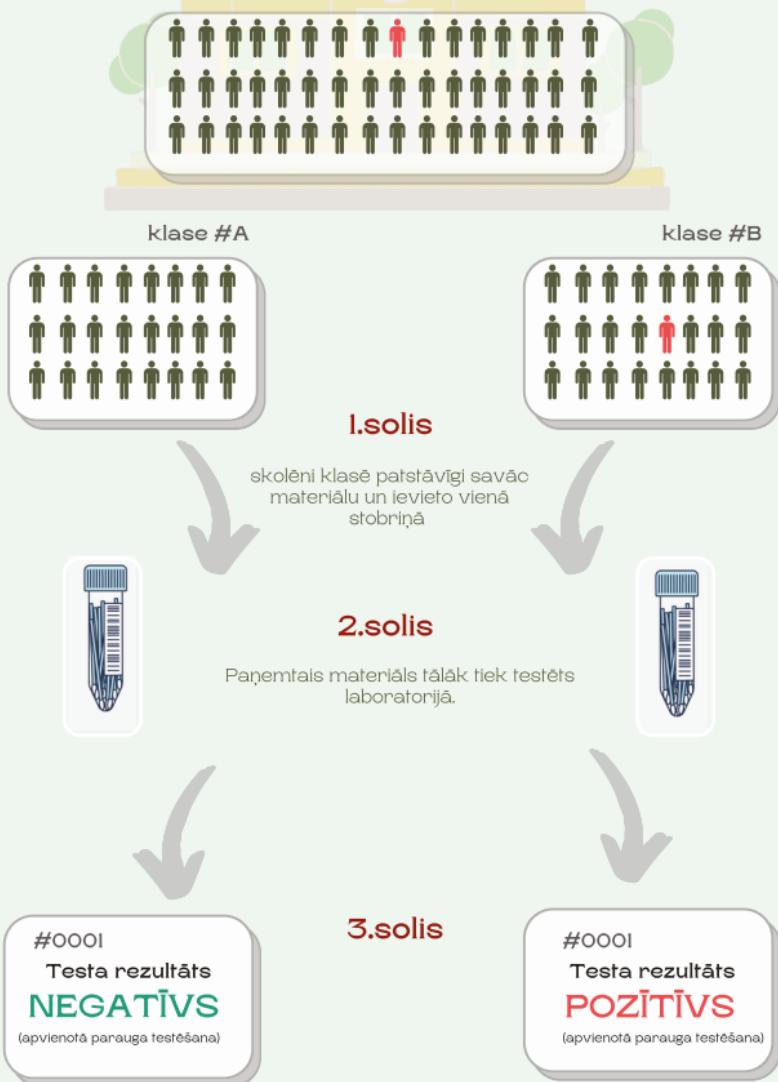

-skolēni turpina mācības klātienē

-skola un skolēni saņem pazinojumu par nepieciešamību nodot individuālu paraugu katram testējamam
-visi testētie ievēro mājas karantīnu l4 dienas



Centrālā
Laboratorija